

# ARAHAN PENGGUNAAN PENGAMBILAN SAMPEL RHINOSWAB JUNIOR

UNTUK DIGUNAKAN DENGAN BANTUAN ORANG DEWASA.




RHINOSWAB  
JUNIOR  
by RHINOMED®

## 1: BASUH ATAU SANITASIKAN TANGAN ANDA.



## 2: PEGANG BAHAGIAN PEMEGANG SAHAJA


dan keluarkan swab daripada bungkusan.

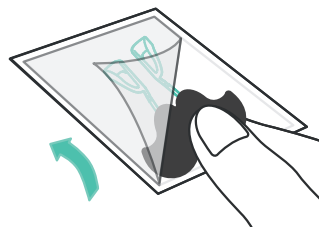

Jangan guna jika sampul telah rosak


## 3: MINTA KANAK-KANAK

memegang swab pada bahagian pemegang dan letak pada hidung.

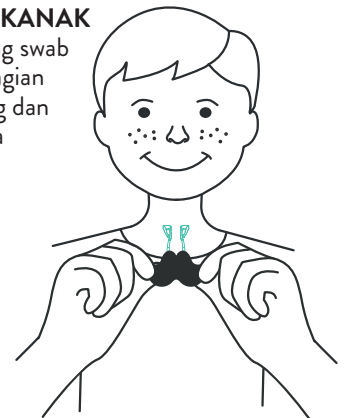


## 4: KANAK-KANAK PERLU MELETAKKAN SWAB

dengan berhati-hati ke dalam hidung setakat yang selesa.

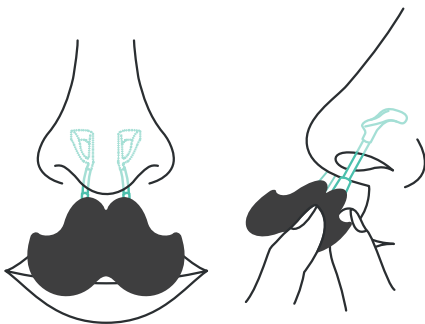

## 5: TETAPKAN PEMASA SELAMA 30 SAAT

dan minta kanak-kanak bernafas melalui hidung seperti biasa.

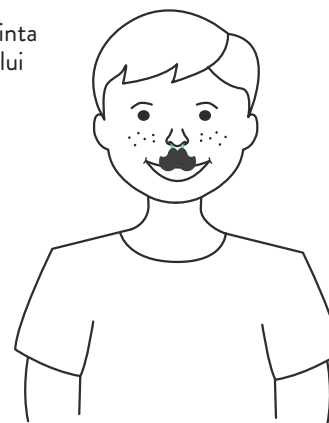

Tetapkan pemasa selama 30 SAAT


**7: SELEPAS 15 SAAT**, minta kanak-kanak menggerakkan swab di dalam hidung selama **15 saat** pastikan gelung ini sentiasa bersentuhan dengan bahagian dalam hidung.

Gerakkan swab di dalam hidung  
**15 saat**



Keluarkan daripada hidung.


**8: PATAHKAN KEDUA-DUA GELUNG KE DALAM TIUB SATU PERSATU.** Masukkan satu persatu gelung ke dalam tiub dan patahkan pada garisan putus.

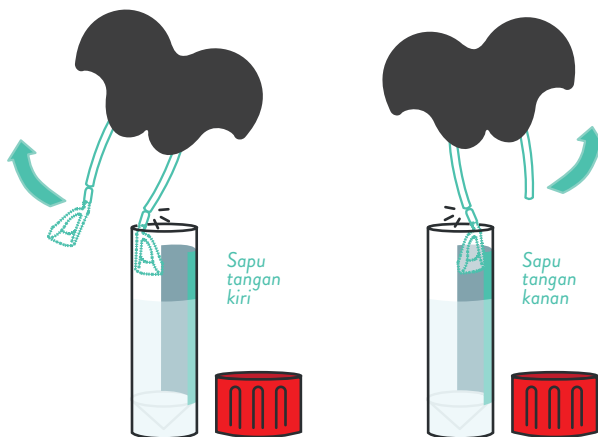

Lakukan dengan membengkokkan batang swab pada bahagian tepi tiub di garisan putus.

**9: PASANG PENUTUP KEMBALI DENGAN KETAT PADA TIUB**

pastikan ditutup dengan ketat supaya cecair tidak bocor.

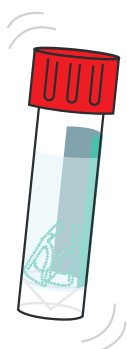

**GONCANG TIUB DENGAN PERLAHAN-LAHAN BEBERAPA KALI**

**10: BASUH ATAU SANITASIKAN TANGAN ANDA.**



**11: PROSES UJIAN.**

Sila ikut arahan untuk mengembalikan sampel kepada pusat ujian yang berkenaan.

Anda juga boleh merujuk kepada arahan pada kit ujian antigen.

SIMBOL	MAKSUD
	<b>RHINOMED</b> Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 Sedang Menunggu Paten	Peranti perubatan
	Badan akreditasi
	Jangan guna semula
	Pendedahan kepada matahari
	Guna sebelum

SIMBOL	MAKSUD
	Semak arahan penggunaan
	Jangan guna jika bungkusannya rosak
	Pengecam peranti unik
	Nombor lot individu
	Katalog pengeluar/nombor rujukan
	Wakil sah Eropah