

ARAHAN PENGGUNAAN PENGAMBILAN SAMPEL RHINOSWAB

Gelung

Masukkan ke dalam lubang hidung

Garis Putus


Pemegang
Letakkan ibu jari di sini

RHINOSWAB
by RHINOMED®

1: CUCI TANGAN.




2: PEGANG BAHAGIAN PEMEGANG SAHAJA dan keluarkan swab daripada bungkusan.

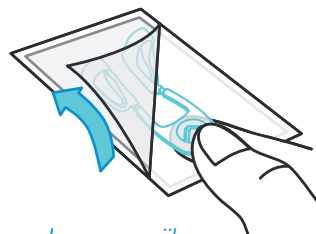


Jangan guna jika sampul telah rosak

3: PEGANG SWAB pada pemegang menggunakan ibu jari dan jari telunjuk.

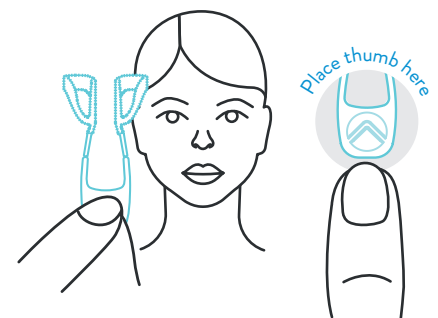

4: LETAKKAN SWAB DI BAWAH HIDUNG.

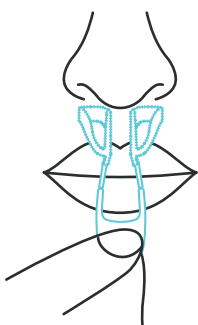


5: MASUKKAN SWAB KE DALAM HIDUNG dengan meletakkan gelung terlebih dahulu dan memasukkan swab perlahan-lahan setakat yang selesa (sekitar 2-3 cm atau 1 inci). Condongkan pemegang swab ke atas semasa memasukkan.

Pemegang akan berada di luar hidung anda



6: TETAPKAN PEMASA SELAMA 30 SAAT dan bernafas melalui hidung seperti biasa.

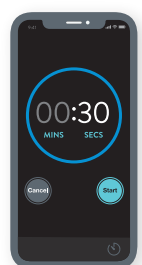


Tetapkan pemasa selama 30 SAAT

7: SELEPAS 15 SAAT, gerakkan swab di dalam hidung selama **15 saat** dengan tekanan sederhana dan pastikan gelung sentiasa menyentuh bahagian dalam hidung anda.



Keluarkan daripada hidung.

8: PATAHKAN KEDUA-DUA GELUNG KE DALAM TIUB SATU PERSATU. Masukkan satu persatu gelung ke dalam tiub dan patahkan pada garisan putus.

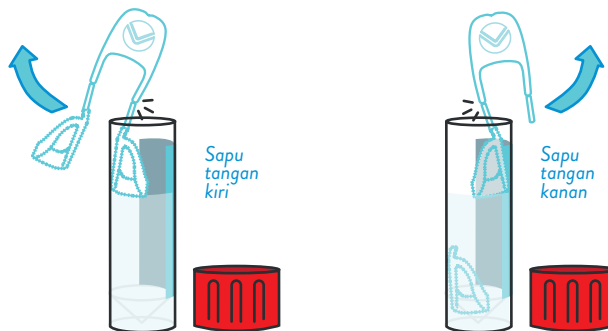

Lakukan dengan membengkokkan batang swab pada bahagian tepi tiub pada garisan putus.

9: PASANG PENUTUP KEMBALI DENGAN KETAT PADA TIUB

pastikan ditutup dengan ketat supaya cecair tidak bocor.



GONCANG TIUB DENGAN PERLAHAN-LAHAN BEBERAPA KALI

10: CUCI TANGAN.



11: PROSES UJIAN.

Sila ikut arahan untuk mengembalikan sampel kepada pusat ujian yang berkenaan.

Anda juga boleh merujuk kepada arahan pada kit ujian antigen.

SIMBOL	MAKSUD
	RHINOMED Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 Sedang Menunggu Paten	Peranti perubatan
	Badan akreditasi
	Jangan guna semula
	Pendedahan kepada matahari
	Guna sebelum

SIMBOL	MAKSUD
	Semak arahan penggunaan
	Jangan guna jika bungkusannya rosak
	Pengecam peranti unik
	Nombor lot individu
	Katalog pengeluar/nombor rujukan
	Wakil sah Eropah